

# INTERIM

DESCRIÇÃO

VANTAGENS

APRESENTAÇÃO

INSTRUÇÕES DE USO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



## Descrição

Material Restaurador Temporário

Utilizado como base terapêutica de restaurações temporárias e forramento de cavidades.

## Vantagens

- Material à base de Óxido e Zinco e Eugenol (modificado);
- Tempo de presa reduzido - 5 a 8 minutos;
- O pó possui a cor marfim;
- Fácil manipulação e inserção na cavidade dental;
- Possui resistência à compressão;
- Apresenta resistência à abrasão;
- Apresenta propriedades antissépticas e sedativas devido ao eugenol;
- Insolúvel no meio bucal;
- Biocompatibilidade como protetor pulpar;
- Promove selamento marginal;
- Fácil remoção.

## Apresentação

Kit:

- 1 frasco com 38g de INTERIM Pó;
- 1 frasco com 15mL de INTERIM Líquido;
- 1 Dosador Laranja.

ou

- 1 frasco com 38g de INTERIM Pó.
- ou
- 1 frasco com 15mL de INTERIM Líquido.

## Instruções de Uso

Proporção de pó / liq (g/g) 6/1 em peso;

1. Em uma placa de vidro dispensar a medida do pó e 1 gota do líquido, dividir o pó em 3 partes iguais;
2. Misturar 1/3 do pó ao líquido e espatular por 20 segundos;
3. Acrescentar mais 1/3 do pó e espatular por 20 segundos;
4. Finalmente juntar o 1/3 restante do pó e espatular por mais 20 segundos até a obtenção de uma massa pouco aderente a placa de vidro;
5. Levar com calcador Holleback porções adequadas de massa à cavidade, completando o assentamento com calcador ou brunidor a medida que o cimento toma presa. Os excessos podem ser eliminados com esculpador Holleback ou com brocas em baixa velocidade.